



Calibration du médicamenteur

Le médicamenteur doit être calibré avant chaque ajout d'un médicament. C'est important pour vous assurer d'administrer la bonne dose de médicament à vos oiseaux.

1 Débranchez le dispositif d'écoulement du médicamenteur de la ligne d'eau.



2 Remplissez une tasse à mesurer avec une quantité déterminée d'eau.



3 Placez une chaudière sous le dispositif d'écoulement du médicamenteur.



4 Déposez le bout du tube d'admission du médicamenteur dans la tasse à mesurer.



5 Faites circuler de l'eau dans le médicamenteur.



6 Si la quantité déterminée d'eau disparaît de votre tasse à mesurer en quantité appropriée le médicamenteur fonctionne adéquatement. Si non, il faut le changer ou le réparer (i.e. si votre médicamenteur est réglé à 1 :100, quand il y aura 10 litres d'eau dans la chaudière placée sous le dispositif d'écoulement, il devrait y avoir 100 ml d'eau de moins dans la tasse à mesurer).



Pour plus d'information, regardez cette vidéo d'instructions : <https://bit.ly/2YIRKrt>